



MEDintim
personal healthcare



DilatorSet

Medyczne rozszerzacze z silikonu do zastosowania do ćwiczeń rozciągających.

Wskazówki dotyczące zastosowania:

Zaczynając od najmniejszego rozmiaru, należy wprowadzać rozszerzacz do pochwy i pozostawiać na kilka minut. Jeśli dany rozmiar można wprowadzić bez dolegliwości do pochwy, zalecamy następnie bezpośrednio przejście do następnego rozmiaru, ponieważ mięśnie pochwy są już wtedy odprężone. Zastosowanie może odbywać się w pozycji leżącej lub stojącej, z jedną nogą postawioną na krześle.

Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, ćwiczenia należy powtarzać codziennie. Brak ograniczeń czasowych odnośnie czasu zastosowania rozszerzaczy.

Jeśli największy rozszerzacz można wprowadzać do pochwy bez dolegliwości, można spróbować penetracyjnego stosunku płciowego.

Obszary zastosowania:

Dolegliwości pochwy i problemy podczas penetracyjnego stosunku płciowego z powodu

- pochwy,
- dyspareunii,
- wskutek operacji ginekologicznej,
- po porodzie.

Zawartość:

- 6 rozszerzaczy z silikonu

Kolor	Średnica A/B	Długość C
Żółty	11/13 mm	65 mm
Czerwony	17/19 mm	75 mm
Niebieski	19/22 mm	90 mm
Fioletowy	22/25 mm	110 mm
Różowy	29/33 mm	130 mm
Szaroniebieski	35/41 mm	150 mm

- środek poślizgowy SYLK (rozpuszczalny w wodzie)
- torba (poliester)

Material:

Rozszerzacze: silikon

PZN 9013412

EAN 401327300079 6

Nr art.: MED DIL SET

CE Wyrób medyczny

